

# BONNES PRATIQUES

## d'utilisation de l'élèvevateur

L'élèvevateur est installé conformément aux recommandations du fabricant.

L'utilisation du verticalisateur doit respecter les bonnes pratiques ainsi que les recommandations d'usage du fabricant.



### INSTALLATION

Approcher l'élèvevateur et positionner les pieds du patient sur la base. **Régler la hauteur** de l'appui tibia. **NE PAS UTILISER DE VERTICALISATEUR SI PROTHESE DE GENOU** ou avis médical contraire.



### FREINAGE

Les freins de l'appareil ne sont utilisés que lors du stockage. Pour bloquer les roues, appuyez sur la partie rouge de la roue jusqu'à l'arrêt en utilisant votre pied. Débloquer en remontant la partie rouge.



### SANGLE

Après avoir installé la sangle au niveau de la taille du patient, le réglage d'accroche se fait en tension avec les bras du patient positionnés à 120°. Positionner les sangles sur les crochets et **vérifier le bon maintien**.



### TÉLÉCOMMANDE

Permet la variation de la **hauteur** et d'effectuer le transfert du patient.

Effectuer le transfert grâce à la télécommande et le bouton montée



et **descente**



### ARRÊT D'URGENCE

Un bouton d'arrêt d'urgence est visible sur le boîtier. A activer en cas d'urgence.

A côté du bouton d'urgence se situe le témoin du niveau de batterie.

- L'élèvevateur doit être chargé régulièrement grâce au câble secteur. L'appareil ne fonctionne pas lorsqu'il est branché.
- Poids patient maximum 180 kg
- Lors de toute manipulation, veiller à **ne pas pincer** les cordons électriques des moteurs et de la télécommande.
- **Ne pas faire** de nœuds avec les cordons.



### BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS

fh. Moyens Auxiliaires

Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates

T. 022 794 52 54

