



BONNES PRATIQUES d'utilisation du lève personne

Le lève personne est installé conformément aux recommandations du fabricant.

L'utilisation du lève personne doit respecter les bonnes pratiques ainsi que les recommandations d'usage du fabricant.



SANGLE

Mise en place de la sangle : Utiliser une taille de sangle appropriée et vérifier du bon état de celle-ci. La mise en place de la sangle doit se faire, au lit en position allongée à 180° en pratiquant une latéralisation, ou au fauteuil.



INSTALLATION

Positionner l'appareil afin que les accroches du cintre soit légèrement au dessus du niveau des yeux du patient. Assurez vous qu'il existe un espace suffisant entre la tête et l'appareil. Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position semi allongée, nous conseillons de régler la sangle en position intermédiaire (réglage jaune aux épaules et noir (ou rouge) au niveau des jambes). Levez le bras de levage jusqu'à ce que les accroches soit tendues. **Vérifier si la sangle est attachée correctement avant de continuer le transfert.**



FREINAGE

Les freins de l'appareil ne sont utilisés que lors du stockage. Pour bloquer les roues, appuyez sur la partie rouge de la roue jusqu'à l'arrêt en utilisant votre pied. Débloquer en remontant la partie rouge.



TÉLÉCOMMANDE

Permet la variation de la **hauteur** et d'effectuer le transfert du patient. Effectuer le transfert grâce à la télécommande et le bouton **montée**



et **descente**



ARRÊT D'URGENCE

Un **bouton d'arrêt d'urgence** est visible sur le boîtier. A activer en cas d'urgence. A côté du bouton d'urgence se situe le témoin du niveau de batterie.

- Le lève personne doit être chargé régulièrement grâce au câble secteur. L'appareil ne fonctionne pas lorsqu'il est branché.
- Poids patient maximum 180 kg
- Lors de toute manipulation, veiller à **ne pas pincer** les cordons électriques des moteurs et de la télécommande.
- **Ne pas faire** de nœuds avec les cordons.



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS

fh. Moyens Auxiliaires

Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates

T. 022 794 52 54

