

Le matelas à air est installé conformément aux recommandations du fabricant. L'utilisation du matelas doit respecter les bonnes pratiques ainsi que les recommandations d'usage du fabricant.

Le matelas est composé de cellules d'air en 2 réseaux. Chaque réseau se gonfle et dégonfle alternativement sur un cycle de 10 minutes. Ne pas utiliser d'outils piquant, coupant, tranchant sur le matelas au risque de percer une cellule.



VANNE CPR

Une vanne rouge permet le dégonflage rapide du matelas en cas d'arrêt cardiaque. Appuyer simultanément sur les 2 touches de déverrouillage pour ouvrir la vanne CPR. Pour la fermer, appuyer sur le bouton central (clic). L'ouverture de la vanne est une cause régulière de panne. Vérifier régulièrement son positionnement.



TRANSPORT

Pour passer le matelas en mode transport, débranchez le raccord du compresseur. Le matelas conserve l'air en circuit fermé durant 12h environ.



ENTRETIEN

Nettoyage : la housse supérieure peut être retirée à l'aide de la fermeture à glissière et nettoyée en machine à 65 °C pendant 10 minutes. Ne pas utiliser de chlore ni de sèche linge.



COMPRESSEUR

Permet de sélectionner le mode **alternatif** ou **statique**.



ou **statique**.



Restez en mode alternatif pour

Confort : Appuyer pour ajuster la pression dans la surface thérapeutique afin de régler le niveau de confort. Toujours régler au confort max pour les patient pesant plus de 200 kg.



Mode soin : permet de surgonfler le matelas le temps de réaliser les soins et la mobilisation du patient pendant 15 min. Le mode peut être augmenté par palier de 5 min. Le voyant s'allume lorsque le mode est actif.



- Poids patient de 20 à 250kg.
- **Ne pas ouvrir** le compresseur. **Ne pas débrancher ni modifier les paramètres du compresseur** sans avis médical.
- Lors de toute manipulation, veiller à **ne pas pincer** les cordons électriques et à air. **Ne pas faire** de nœuds avec les cordons.



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS

fh. Moyens Auxiliaires

Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates

T. 022 794 52 54

