



BONNES PRATIQUES

d'utilisation du fauteuil confort

L'utilisation du fauteuil roulant doit respecter les bonnes pratiques ainsi que les recommandations d'usage du fabricant.



FREINAGE

Les freins utilisateurs doivent être **enclenchés** à chaque transfert.



INCLINAISON

Deux manettes sont situés à l'arrière du dossier. Elles permettent de faire **varier** l'angle du dossier et de l'assise. Appuyer sur l'une des 2 manettes pour procéder à l'inclinaison et relâcher pour bloquer l'angle.



ROUES

Vous pouvez retirer ou installer les roues arrières en appuyant sur le bouton de déverrouillage rapide. Lors de la remise en place, le bouton doit revenir dans sa position de départ. **Vérifier** systématiquement que la roue est bien bloquée.



REPOSES JAMBES

Les repose-jambes peuvent être **escamotés** sur le côté ou retirés pour faciliter les transferts.

Les repose-jambes peuvent être inclinés grâce à la manette gris clair. L'ouvrir pour procéder au réglage de l'angle et la pousser pour bloquer l'angle.



ANTI BASCULE

La roulette anti-bascule doit être **installée** systématiquement afin d'éviter à l'utilisateur de basculer vers l'arrière. Pour franchir un obstacle il est possible de la relever en appuyant sur le bouton. **Veillez** toujours à l'abaisser une fois l'obstacle franchi.

- Le transport en véhicule adapté, d'une personne installée sur son fauteuil doit respecter certains points de sécurité (ceinture, appui tête, kit de transport).
- Poids patient maximum 140 kg
- Vérifiez les pneumatiques et les vérins régulièrement.



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS

fh. Moyens Auxiliaires

Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates

T. 022 794 52 54

