



# BONNES PRATIQUES

## d'utilisation du matelas AXTAIR

Le matelas à air est installé conformément aux recommandations du fabricant. L'utilisation du matelas doit respecter les bonnes pratiques ainsi que les recommandations d'usage du fabricant.

Le matelas est composé d'un sous matelas mousse de 5 cm et de 18 cellules d'air de 12 cm, en 2 réseaux. Chaque réseau se gonfle et dégonfle alternativement sur un cycle de 10 minutes.

Ne pas utiliser d'outils piquant, coupant, tranchant sur le matelas au risque de percer une cellule.



### TRANSPORT

**Mode transport** : pour passer le matelas en mode transport, débranchez le raccord et placez le capuchon fourni sur l'extrémité. Le matelas conserve l'air en circuit fermé durant 24h environ.



### CELULES DE DECHARGE

Le matelas dispose de vanne situé sur les 4 dernières cellules pour mettre en décharge les talons. Sélectionner une seule des 4 cellules à décharger.



### ENTRETIEN

**Nettoyage** : la housse supérieure peut être retirée à l'aide de la fermeture à glissière et nettoyée en machine à 40 °C pendant 10 minutes. Ne pas utiliser de chlore ni de sèche linge.



### COMPRESSEUR

Le compresseur est un modèle tout automatique qui gère le poids et la position de la personne allongée. **Mode DYNAMIC** : un voyant vert est affiché en face du mode sélectionné.



**Position Assise** : A sélectionner si le relève buste est incliné (max 70°) afin que le compresseur puisse modifier les paramètres de pression dans les cellules centrales afin d'assurer un niveau d'air suffisant



**Mode soin** : permet de surgonfler le matelas le temps de réaliser les soins et la mobilisation du patient. Au bout de 30 min, la pompe revient par défaut sur le mode précédent.



- Poids patient de 30 à 180kg.
- **Ne pas ouvrir** le compresseur. **Ne pas débrancher ni modifier les paramètres du compresseur** sans avis médical.
- Lors de toute manipulation, veiller à **ne pas pincer** les cordons électriques et à air. **Ne pas faire** de nœuds avec les cordons.



### BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS

fh. Moyens Auxiliaires

Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates

T. 022 794 52 54